

RECOMENDACIONES SIED PARA EL REPROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA



META: La calidad en el reproceso y desinfección de alto nivel de instrumentos es obligatorio en todo servicio de endoscopia; el índice de cumplimiento debe ser del 100%

Uniendo la Endoscopia
de las Américas

PUNTOS CRUCIALES AUDITABLES

- ✓ Seguir siempre las instrucciones del fabricante.
- ✓ Designar un área de desinfección específica, bien ventilada e iluminada.
- ✓ Capacitación continua del personal responsable del reproceso y desinfección.
- ✓ Toma de aire a presión para secado de conductos del endoscopio.
- ✓ Revisión diaria de superficies, válvulas y conductos.
- ✓ Detergentes y desinfectantes usados deberán tener controles de actividad.
- ✓ Evaluar (cultivos) la calidad del agua local.
- ✓ Programa de mantenimiento preventivo con revisión de conductos por el fabricante.

10

TIPS PARA EL REPROCESAMIENTO

- 1 Lavado externo, aspirado y cepillado de conductos inmediato, al finalizar el procedimiento.
- 2 Prueba de fugas y posterior inmersión en detergente enzimático.
- 3 Lavar con detergente enzimático y cepillar secciones accesibles de conductos hasta remover completamente los detritos.
- 4 Colocar adaptadores de limpieza e irrigar los conductos con detergente limpio por el tiempo señalado para el producto.
- 5 Enjuague de equipo con agua filtrada y purgar conductos usando adaptadores.
- 6 Purgar conductos con aire para remover el agua.
- 7 Desinfección de Alto Nivel en reprocesador automático de endoscopios flexibles. Ciclos de limpieza y desinfección. Al final del ciclo, enjuagar con agua estéril.
- 8 Desinfección de Alto Nivel manual. Endoscopio inmerso en líquido desinfectante; llenar conductos con solución desinfectante. Dejar en inmersión de acuerdo con instrucciones del fabricante. Purgar desinfectante de conductos con aire. Lavar el exterior y conductos con agua, eliminando por completo el desinfectante. Secar después de cada reprocesamiento el exterior con aire comprimido. Conductos con alcohol (70%) y aire forzado (10 minutos).
- 9 Antes de guardar, el equipo endoscópico debe estar seco.
- 10 Siempre que aplique seguir las recomendaciones del fabricante y mantener contacto con responsables de comités de infecciones locales.

